

# 使用方法

## (1) APミキサーⅢの作動

### ①電源コードの差し込み

電源コードを100V用コンセントに差し込みます。

### ②電源スイッチON

電源スイッチをONにします。各表示ランプが正常に点灯するか確認のために全ての表示ランプが1秒間点灯して、電源ランプ（緑色）と稠度／吐出速度表示（橙色）を残して、全てが消灯します。

注) 電源ランプ、稠度／吐出速度表示が点灯しない場合は、本書の「故障かな」(21頁)を参考に処置して下さい。

### ③乾燥防止キャップの取り外し

攪拌部にセットされている乾燥防止キャップを取り外します。

### ④ペースト残量の確認

基材／硬化材残量確認ランプが点灯していないこと、及びペーストパック内にペーストが十分にあることを確認します。更にパック内のペーストを、スクイザーを用いてノズル付近に集めて下さい。

注) 吐出前にパック内のペーストをノズル付近に集めておくと、ペーストを無駄なく使用できます。



注) ペースト残量が少ない場合は、新しいペーストパックに交換して下さい。

※ペースト残量確認ランプが点灯した時の操作方法については、「(4) 基材・硬化材残量確認」(17頁)を参照して下さい。

### ⑤攪拌子のセット

図に従って攪拌子を攪拌軸に確実に差し込みます。

攪拌子を少し回しながら攪拌軸に入れると簡単にセットできます。

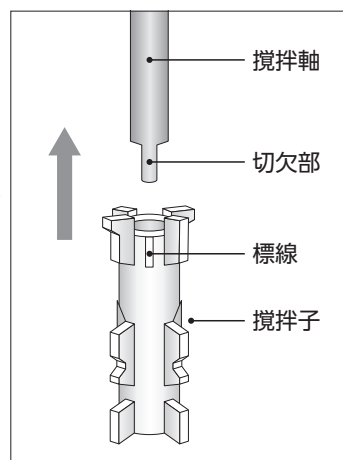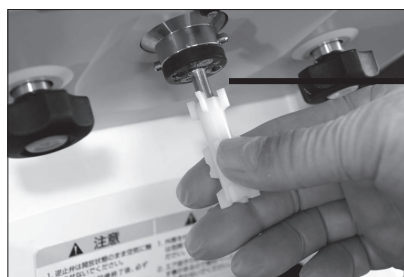

### ⑥外筒のセット

外筒を攪拌子に沿ってセットします。

外筒を右方向（時計回り）にひねり外筒固定ノブにセットします。

吐出スタートスイッチ（緑色）が点灯していることを確認します。

注) 確実にセットしないと外筒セットスイッチが入らず練和吐出ができません。

注) 確実にセットしても吐出スタートスイッチが点灯しない場合は、本書の「故障かな」(21頁)を参考に処置して下さい。

