

義歯床補修用レジン (リライニング材)

トクヤマリベースII

ファースト ノーマル



適合性を追求!!

低刺激性床裏装材がさらに進化



(管理医療機器) 認証番号 214008Z200144000

ご使用の際は必ず製品の添付文書をよくお読みください。

ファーストセット		ノーマルセット		セット価格: ¥12,000	
【色調】 ピンク ライトピンク ライブピンク (補綴入り)		【色調】 ピンク ライトピンク ライブピンク (補綴入り)		■セット構成	単品価格
				粉末 ^{※2}	80g ¥5,800
				液 ^{※2}	50mL ¥5,800
				接着材	15mL ¥1,600
				トクソーレジン硬化促進剤II	48g ¥1,600
				ラバーカップ (No. 3)	1個 ¥1,100 (2個入)
				粉末計量カップ ^{※2}	1個 ¥400
				スポイト	1本 ¥600
				筆 (No. 5)	1本 ¥1,100 (4本組)
				スパチュラ (No. 001)	1本 ¥500
				硬化促進剤用スプーン	1本 —

※2 粉末・液および粉末計量カップには、ファースト用とノーマル用の2種類があります。

関連製品

金属面への接着材

コバルトクロム、チタン合金等 非貴金属面には



歯科金属用接着材料 (非貴金属用)
(管理医療機器) 認証番号 202008Z201475000
トクソーリベース MRボンド
【包装】
液 5.5mL 1本
小筆 1本
¥5,400

金、銀、金銀パラジウム等 貴金属合金面には



歯科金属用接着材料 (貴金属用)
(管理医療機器) 認証番号 210008Z200115000
メタルタイト
【包装】
液 5mL 1本
¥8,000

その他材料



歯科適合試験用材料
(一般医療機器) 届出番号 0882X00011000109
トクヤマ フィットテスター
【包装】
ベース 50mL 1本
キャタリスト 50mL 1本
少量採取ノズル 2個
練和紙 (No. 30) 1冊 ¥4,800



トクヤマリベースIIの保管に!

トクヤマリベースIIの構成成分をコンパクトに収納
院内での保管はもちろん、持ち運びも便利

トクヤマリベースII プラケース (ブルー)
トクヤマリベースII プラケース (ピンク)
各 ¥2,000



写真はノーマルセットを収納

※このパンフレットの内容は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。価格は2015年10月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。

■ご用命は:

株式会社 トクヤマデンタル

インフォメーションサービス
受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日祭日は除く)
0120-54-1182

札幌 (011) 812-5690 仙台 (022) 717-6444 東京 (03) 3835-7201
名古屋 (052) 932-6851 大阪 (06) 6386-0700 福岡 (092) 412-3240

ホームページ <http://www.tokuyama-dental.co.jp>

トクヤマリベースⅡ ファースト ノーマル


「トクソーリベース」が
やさしく・強く・使いやすく
『トクヤマリベースⅡ』へ

豊富なバリエーション

2種類の硬化パターン

硬化パターンの異なる2タイプ（ファースト・ノーマル）。症例に応じて使い分けが可能です。

ファースト…… チェアタイムの短縮になります。
ノーマル…… 十分な筋形成が可能です。

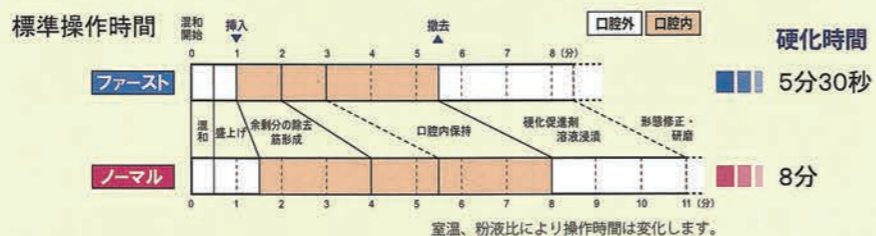


色は3色

ファースト・ノーマルにそれぞれ3種の色を用意しました。義歯に合わせてお選びください。




1. 患者さんの不快感をさらに軽減

- 従来の不快な臭いと味が軽減され、硬化発熱もより少なくなりました。

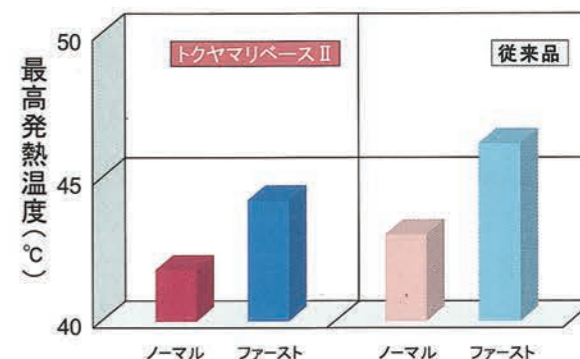


2. 耐久性がさらに向上

- 素材の靱性向上と接着材の改良により、ひび割れ・剥がれが起こりにくくなりました。
- 確実な硬化表面により面荒れが少なくできるため、着色が軽減されます。

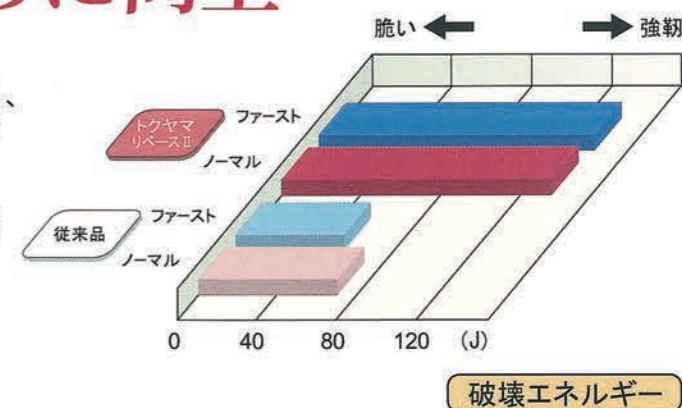


3. 研削・研磨が容易

- 研磨くずが研削バーに絡みつきにくく、快適に研削できます。
- チッピングが少なく、短時間で境界部が目立たなくなります。

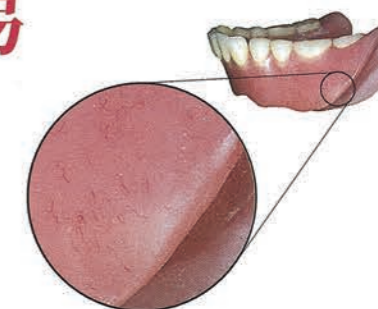

境界部拡大

トクヤマリベースⅡの操作手順

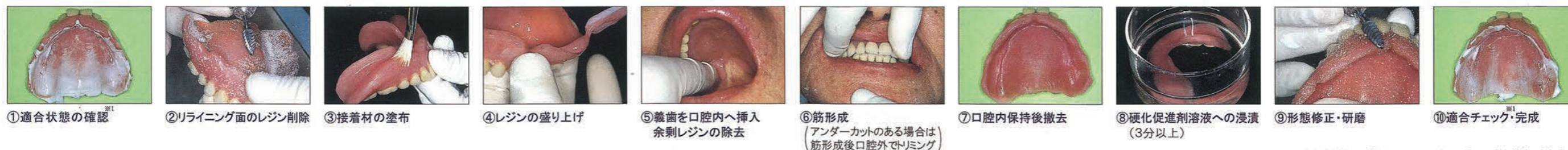

〈このパンフレットに掲載した測定値等は、自社によるものです。〉

※1 適合試験材は、『トクヤマフィットテスター』をお薦めいたします。