

歯科材料3 義歯床材料
一般医療機器 歯科用分離材 70923000

トクソーレジンセパレーター

【禁忌・禁止】

- 1) 本品又はシリコーン系材料に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1) 形状

本品は、下記成分より構成される。

構成品目	性状	成分
液	液	ポリジメチルシロキサン

付属品：筆

2) 原理

液状の塗膜が分離効果を示す。

【使用目的又は効果】

口腔内で使用できる分離材であり、義歯床及び人工・天然歯と、歯科材料との分離、歯科材料間の分離に用いる。

【使用方法等】

- 1) 筆等を用いて分離効果を期待する部位に本品を塗布する。
 - セメント余剰部の除去に使用する場合は、本品が支台や装着物被着面（クラウン内面等）に付着しないよう十分注意して下さい。
- 2) その後修理、接着、合着を行う。
- 3) 硬化後余剰のレジンやセメントを除去する。
- 4) アルコールで本品を塗布した部位を拭き取る。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

※本品を用いる際に併用する他の材料については、各々の材料の添付文書あるいは取扱説明書（使用説明書）に従って処理すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ・他の材料との混和は避けること。
 - ・感染防止のため、筆は清浄なものを使用すること。また使用後はアルコール洗浄すること。
 - ・包装または容器が破損していた場合は、使用しないこと。
 - ・使用後は容器の蓋を確実に締めて保管すること。
 - ・液容器内に残液がある場合は、ティッシュ等に含ませた後、ティッシュは可燃ゴミ、容器は産業廃棄物として廃棄すること。
 - ・本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ・本品は、歯科医療有資格者以外の人は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ・本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた患者／術者においては、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせる／受けること。
 - ・本品を使用する際は、必ず医療用（歯科用）手袋、保護眼鏡及びマスク等を着用し、目や皮膚、さらには衣類に付着しないよう十分注意すること。なお、医療用（歯科用）手袋は本品の直接的接触を防ぐが、一部の溶媒が短時間のうちに浸透することが知られているので、本品が付着した場合は直ちに手袋を捨て、流水で手を十分洗浄すること。
 - ・本品が患者の目や皮膚、あるいは衣類に付着しないような措置を講じること。また、口腔粘膜には極力付着させないこと。
 - ・本品が、万一目に入った場合は、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けさせる／受けること。

- ・口腔内で使用した場合は、処置後口腔内を十分洗浄すること（十分に洗口させること）。また、皮膚に付着した場合は、アルコール（綿球）で拭き取った後、石鹼を使用し流水で十分洗浄すること。衣類に付着した場合は、直ちにアルコール（綿球）で拭き取ること。

3) 不具合・有害事象

- ・本品の使用に伴い、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が発生することがあります。

4) その他の注意

本書の記載内容は、作成／改訂時点で入手できる資料、情報、データに基づき作成していますが、新しい知見により改訂することがあります。

【保管方法及び有効期間等】


【保管方法】

- ・本品は、高温、多湿、直射日光、火気を避けて、「0～25℃」で保管すること。
- ・歯科医療従事者以外の人が触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期間】

本材は包装に記載の使用期限[※]までに使用すること。

[記載の使用期限は自己認証（当社データ）による。]

※（例） ○○○○-○○ は
使用期限○○○○年○○月 を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売／製造 株式会社トクヤマデンタル
住所 〒314-0255茨城県神栖市砂山26
電話番号 (フリーダイヤル) 0120-54-1182

ご使用前に本書の
使用上の注意をよく
お読み下さい。