

トクヤマリベース接着材

【禁忌・禁止】

本品又はメタクリレートモノマー、有機溶剤に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1) 形状

本品は、床裏装において義歯床のレジン部分への「トクヤマリベースⅢ」等の当社裏装材の接着性を向上させる接着材である。

本品は下記成分より構成される。

| 構成品目 | 性状 | 成分 |
|------|----|---------------------------|
| 接着材 | 液体 | 酢酸エチル／メタクリレート系ポリマー その他 |

・付属品：筆、接着材用カップ、接着材瓶用ドロップ栓

2) 原理

酢酸エチルが表層を溶解し、次いでメタクリレート系ポリマーが裏装材とレジン床の相溶性を向上させ、両者の接着性を向上させる。

【使用目的又は効果】

【使用目的】

義歯床の裏装（部分補修）において、義歯床へのレジンの接着に用いる。

【使用用途】

義歯床の全部裏装、部分裏装・補修における裏装材の接着に用いる。

【使用方法等】

1. 通法に従い、以下を行う。

1) 咬合状態のチェックと調整

裏装を行う前に上下顎の咬合状態を検査し、咬合圧が均等に咬合面に加わるように、必要に応じて咬合調整を行います。

2) 適合状態のチェック

床義歯及び口腔内を清掃し、適合試験材：「トクヤマフィットテスター」（別売）等を用いて義歯の適合状態を調べます。

2. 本品の取扱い・操作方法

3) 被着面の調整

裏装を行う義歯床粘膜面及び辺縁部分のレジンを一層研削・削除して、義歯床の新鮮面を露出させ、水洗・乾燥させます。

4) 本品の塗布

本品を付属の接着材用カップに小分けした後、被着面全面に筆で均一に塗布し、20秒間放置して乾燥させます。また、歯槽頂付近など接着材が溜まって乾燥していない部位がある場合には、更にエアブローを行い完全に乾燥させます。

●被着面に金属部分がある場合には、接着材塗布前に、その部分には「トクヤマ ユニバーサルプライマー」（別売）等、当社の金属用接着材を使用する製品の添付文書に従って使用して下さい。

●義歯床唇頬舌側面の裏装が必要な部分にも、確実に接着材を塗布して下さい。

●義歯床と裏装材の境界部分は、裏装材の剥離を防ぐため2～3回塗布して下さい。

●本品の効果は塗布後約10分間有効です。

●本品は揮発しやすいので、使用後は必ず蓋を締めて下さい。

5) 裏装材の適用

被着面に、調整した裏装材を塗布・築盛し、裏装を行います。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

・裏装材の調整・取扱い（裏装の方法）は、使用する製品の添付文書などに従うこと。

・衛生面を考慮して、使用の際には付属の接着材用カップに本品を適量採取し、筆を用いて塗布すること。瓶の先端に接着材採取を容易にする接着材瓶用ドロップ栓を装着して使用すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ・本品と裏装材の液は間違えないように注意すること。
- ・本品は「トクヤマリベースⅢ」等の当社裏装材以外には使用しないこと。
- ・本品は可燃性なので、火気の近くで使用しないこと。本品を使用する際は、適切な換気（1時間当たり数回の換気）を行うこと。
- ・揮発性が高いので、使用後は蓋を確実に締めて保管すること。
- ・本品は一部のプラスチック、ビニール等を溶かすので注意すること。
- ・感染防止のため、筆、接着材用カップは清浄なものを使用すること。また使用後はアルコール洗浄によって、消毒と同時に筆先等の付着物を除去すること。
- ・容器が破損していた場合は、使用しないこと。
- ・本品は、ティッシュペーパーなどに含ませて廃棄すること。なお、その際は揮発蒸気を吸い込まないよう注意すること。
- ・本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外の人は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ・本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた患者／術者においては、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせる／受けること。
- ・本品を使用する際は、必ず医療用（歯科用）手袋及び保護眼鏡等を着用し、目や皮膚、さらには衣類に付着しないよう十分注意すること。なお、医療用（歯科用）手袋は本品の直接的接触を防ぐが、一部の有機溶媒が短時間のうちに浸透することが知られているので、本品が付着した場合は直ちに手袋を捨て、石鹸を使用し流水で手を十分洗浄すること。
- ・本品が患者の目や皮膚、あるいは衣類に付着しないような措置を講じること。また、適用部位以外の口腔粘膜にはなるべく付着させないこと。
- ・本品が、万一目に入った場合は、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けさせる／受けること。
- ・皮膚に付着した場合は、直ちに石鹸を使用し流水で十分洗浄すること。衣類に付着した場合は、直ちにアルコール（綿球）で十分拭き取ること。

3) 不具合・有害事象

- ・本品の使用に伴い、発疹・湿疹、発赤、潰瘍、腫瘍、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が発生することがあります。

4) その他の注意

- ・本書の記載内容は、作成／改訂時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成していますが、新しい知見により改訂することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本品は、火気及び高温、多湿、直射日光などを避けて「0～

ご使用前に本書の
使用上の注意をよく
お読み下さい。


25℃」で保管すること。

- ・同一保管場所に大量に保管しないこと。また、使用及び保管場所には、消火器を備えること。
- ・歯科医療従事者以外の人に触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本品は包装に記載の使用期限*までに使用すること。

[記載の使用期限は自己認証(自社データ)による]

※(例 ○○○○-○○ は
使用期限○○○○年○○月 を示す。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売/製造 株式会社トクヤマデンタル

電話番号 (フリーダイヤル) 0120-54-1182