




# 使用方法と使用例

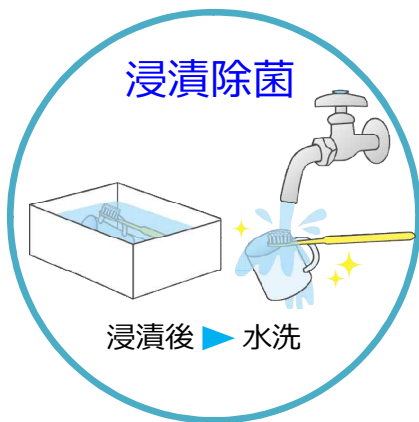

## 最短10秒※で簡単除菌

※ 使用濃度によって作用時間は異なります。  
詳しくは「菌・ウイルスに対する作用時間と除菌率」を  
ご参照ください。

推奨希釈倍率：

原液

5倍

10倍

### 【使用例】



ユニットまわりに



キャビネット等に



待合室のソファー等に



保護メガネに



歯ブラシやTBI時の  
ツールに



マウスガード等に



スパチュラやツール類に



トイレに



往診時のツール類に



スリッパに



タオルや布類に



床や壁に



次亜塩素酸水対応  
噴霧器で空間除菌に



吐瀉物処理時に