

保険適用

歯科用知覚過敏抑制材料
歯科用シーリング・コーティング材

Tokuyama

トクヤマ シールドフォース プラス

生活歯歯冠形成（生PZ）を行った歯に対して、本品を用いて象牙細管の封鎖を目的にコーティング処置を行った場合に、1歯につき1回限り46点保険算定できます。



象牙質レジンコーティング法※1 使用上のポイント

ご使用前に必ず注意事項等
情報もよくお読み下さい。

○ コーティング処理 ～ テンポラリークラウン仮着まで

- 1 支台歯形成
清掃
乾燥**


※コーティング処理前に、必ず支台歯形成面を清掃、乾燥して下さい。
- 2 塗布
10秒放置** **10秒**



弱めのエアでコーティング層が動かなくなるまで乾燥し、その後中圧～強圧で乾燥
- 3 エアブロー**


弱めのエアでコーティング層が動かなくなるまで乾燥し、その後中圧～強圧で乾燥
- 4 光照射** **10秒**

- 5 未重合層の除去**


※コーティング層表面の未重合層をアルコール綿球で拭き取して下さい。未重合層が残っていると、印象体が面荒れする可能性があります。
- 6 印象採得**


※被膜厚さが生じるため、印象採得はコーティング処理後に行して下さい。
- 7 テンポラリークラウン作製**


※直接法でアクリル系即重レジンを用いてテンポラリークラウンを作製する場合は、ワセリン等の分離材を塗布して下さい。
分離材は、仮着前にアルコール綿球等で確実に拭き取して下さい。
- 8 仮着**


※レジン系の仮着材は使用しないで下さい。コーティング面に接着する恐れがあります。

推奨品

カルボキシレートセメント
非ユージノール系仮着材


※1 令和2年4月1日の保険改正にて新設された「I001-2 象牙質レジンコーティング」の保険適用症例について示します。
その他の症例についての使用上の注意等は、注意事項等情報をお読み下さい。

○ 仮着材除去 ～ 最終補綴物装着まで

補綴物装着に接着性レジンセメント「エステセムⅡ」を使用する場合

前処理不要のセルフアドヒーズセメントは高い接着力が得られない恐れがあるため使用しないで下さい。

1 仮着材除去 清掃

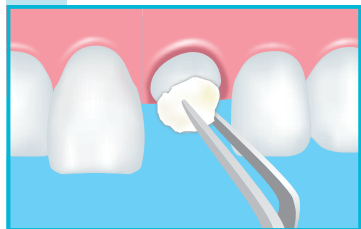

※仮着材の清掃は、コーティング面をアルコール綿球等により十分行って下さい。

2 補綴物と支台歯の処理



補綴物、コーティング面ともにボンドマー ライトレスⅡを塗布

3 エアブロー



※被膜が厚くなる恐れがありますので、塗布後、30秒以内にエアブローを行って下さい。


4 装着



補綴物にエステセムⅡペーストを塗布して速やかに装着、圧接




5 余剰セメント除去

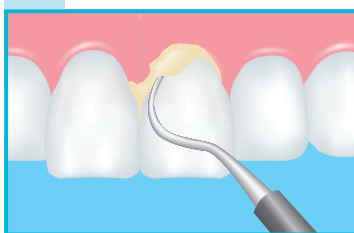

余剰セメント除去

- 光重合を利用した場合
…余剰ペーストに2～4秒光照射を行い、半硬化したところで除去
- 光重合を利用しない場合
…圧接後1分～3分半の間に余剰ペーストを除去

6 光照射

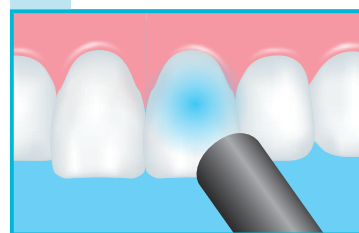

補綴物の上から20秒以上光照射(接着面が広い場合は全ての面を光照射)

※必ず光照射を行って下さい。

関連製品



歯科用知覚過敏抑制材料
歯科用シーリング・コーティング材

トクヤマ シールドフォース プラス

(管理医療機器) 認証番号222AFBZX00063000



歯科接着用レジンセメント

エステセムⅡ **ボンドマー ライトレスⅡセット**

(管理医療機器) 認証番号228AFBZX00129000



ハンドミックス セット



歯科用エッチング材

トクヤマ 歯面清掃材

(管理医療機器) 認証番号21500BZZ00681000

※このパンフレットの内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

230201

株式会社 トクヤマデンタル

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00～12:00/13:00～17:00(土日祝日を除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索

●札幌 TEL011-812-5690 ●仙台 TEL022-717-6444 ●東京 TEL03-3835-7201 ●名古屋 TEL052-932-6851 ●大阪 TEL06-6386-0700 ●福岡 TEL092-412-3240