


機械器具 6 6 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000
トクヤマディスペンサー II

【形状・構造及び原理等】

1) 形状・構造

本品は、握る操作でプランジャーを前進させるハンドルと、装着した専用カートリッジ内の内容物を押し出すプランジャー等から成る。

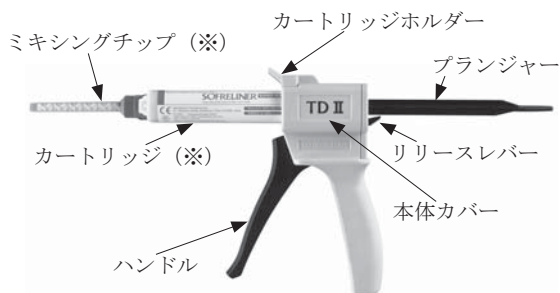

※ミキシングチップ及びカートリッジは別売

・材質

プランジャー	ポリエーテルイミド樹脂
リリースレバー	ポリエーテルエーテルケトン樹脂
カートリッジホルダー	ポリスルフォン樹脂
ハンドル	ポリアミド樹脂
本体カバー	ポリスルフォン樹脂

2) 原理

ハンドルを握る操作によってプランジャーが前進し、装着した専用カートリッジ内の2種類のペーストを押し出す。

【使用目的又は効果】

歯科材料を練和又は混和するために用いる器具。


【使用目的又は効果に関連する注意事項】

使用する製品カートリッジが本品への装着に適したものであることを確認の上、使用すること。

【使用方法等】

本品に破損などの異常がなく適切に稼動すること、使用する製品カートリッジ及びミキシングチップ（別売）に破損などの異常がないことを確認します。

- 1) リリースレバーを押し上げながら、プランジャーを引き戻します。
- 2) カートリッジホルダーを引き上げ、カートリッジ末端の切り欠き（下図参照）が下になるようにして製品カートリッジを装着し、カートリッジホルダーを閉じてカートリッジを固定します。

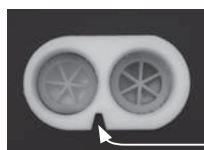

カートリッジ末端の切り欠き

- 3) カートリッジのキャップを取り外します。
●ハンドルを握ってカートリッジ内のペーストをごく少量吐出させ、左右両方のペーストが均等に吐出されることを確認します。片方しか吐出されない場合は、均等になるまでペーストを吐出させてください。

- 4) ミキシングチップ（別売）を使用する際は、ミキシングチップの三角突起とカートリッジ先端の切り欠きを合わせてセットし、時計回りに90°回転させ、ミキシングチップを確実に固定します。
- 5) ハンドルを握ってペーストを押し出します。ミキシングチップ使用時は、ミキシングチップの先端から練和物を吐出させます。
- 6) リリースレバーを押し上げながらプランジャーを引き戻し、カートリッジホルダーを引き上げて製品カートリッジを取り外します。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・ペーストを急激に押し出すと、ペーストの漏れ、カートリッジの破損を引き起こすことがあるので、押し出しには注意すること。
- ・本品を使用する際は、使用する製品（カートリッジ入り）及びミキシングチップの添付文書／使用説明書等の指示に従うこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ・本品が破損していた場合は、使用しないこと。
 - ・使用後は、感染性の汚染が考えられる場合は医療廃棄物として、汚染のない場合は産業廃棄物として廃棄すること。
 - ・本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ・本品は、歯科医療有資格者以外の人は使用しないこと。
- 2) その他の注意

本書の記載内容は、作成／改訂時点で入手できる資料、情報、データに基づき作成していますが、新しい知見により改訂することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・歯科医療従事者以外の人が触れないように適切に保管・管理すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売 株式会社トクヤマデンタル
住所 〒314-0255茨城県神栖市砂山26
電話番号 (フリーダイヤル) 0120-54-1182

ご使用前に本書の
使用上の注意をよく
お読み下さい。