

コ ア 材 料

エステコア ボンドマー ライトレス セット	B-2
エステコア ハンドタイプ	B-3
ミニミキシングチップS	B-5
金属ノズル付ミニミキシングチップS	B-5
トクヤマディスペンサー10mLタイプ	B-5
トクヤマFRポスト	B-5



エステコア ボンドマー ライトレス セット

歯科用支台築造材料

- 直接法による支台築造、間接法による支台築造に使用する支台築造用レジンです。
- ボンドは1ステップ・セルフエッチング・化学重合タイプ、ペーストはオートミックスタイプのデュアルキュアタイプです。
- ボンドは化学重合でありながら高い接着力を発揮し、光の届かない根管部においても安心してお使いいただけます。
- ペーストは押し出し感の良さと、築盛しやすいチキソトロピー性を併せ持ち、硬化後の切削感も象牙質に近似しています。
- 物性的にも高い曲げ強さと象牙質に近似した曲げ弾性率を両立し、硬化体の表面硬度にも優れています。

※本品をご使用の際は、別売の「トクヤマディスペンサー 10mLタイプ」が必要です。

※キットはユニバーサルのみです。

包装 1箱＝ペーストA/B (ユニバーサル) 各10g 1本、
ボンドマー ライトレス A液 3mL、
ボンドマー ライトレス B液 3mL、
ミニキシングチップS 20個、
ミニキシングチップ用ノズル 20個、
ダッペングラス (6穴皿) 1個、
ディスポ混和皿 5個、
ミニブラシ (ブラック) 50本

(管理医療機器) 認証番号225AFBZX00068000



エステコア ペースト 単品


歯科用支台築造材料

- ペーストの色調は2種類。
 - ・ユニバーサル
審美修復に適しています。OA2に近似した色調です。
 - ・ブルー
充填部位の識別が容易で、天然象牙質とレジンとの境界部が明確になります。
- 直接法の場合、根管内を『ブルー』で充填し、歯冠部を『ユニバーサル』で築盛すると、審美修復に適した支台築造と根管部の歯質とレジンとの境界部を明確にできます。

色調 2色 ユニバーサル、ブルー

包装 1箱＝ペーストA/B (各10g) カートリッジ入り 1本

(管理医療機器) 認証番号225AFBZX00068000

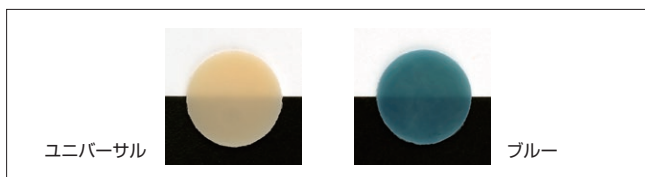

■表 種々の照射条件における硬化深度について (参考)

※JIS T6523による

光源	光量 (mW/cm ²)	照射時間 (秒)	光硬化深度 (mm) *
ハロゲン	300	10	1.7
	800	10	2.2
LED	300	10	1.7
	800	10	2.2



エステコア ハンドタイプ

歯科用支台築造材料

- 5mLシリンジで楽々ハンドリング。
- コンパクトで色々な診療ポジションで使いやすい。
- 径が細く根管内で扱いやすい『金属ノズル付ミニミキシングチップS』（別売）も使用できます。

包装 1箱＝ペーストA/B（ユニバーサル）

各2.3mL（各4.5g）1本、

ボンドマー ライトレス A液 3mL、

ボンドマー ライトレス B液 3mL、

ミニミキシングチップS 10個、

ミニミキシングチップ用ノズル 10個、

ボンドマー用混和皿 1個、

ディスポ混和皿（1穴）5個、

ミニブラシ（ブラック）25本

（管理医療機器） 認証番号230AFBZX00052000



エステコア ハンドタイプ ペースト単品

歯科用支台築造材料

- ペーストの色調は2種類。
 - ・ユニバーサル
審美修復に適しています。OA2に近似した色調です。
 - ・ブルー
充填部位の識別が容易で、天然象牙質とレジンとの境界部が明確になります。
- 直接法の場合、根管内を『ブルー』で充填し、歯冠部を『ユニバーサル』で築盛すると、審美修復に適した支台築造と根管部の歯質とレジンとの境界部を明確にできます。

色調 2色 ユニバーサル、ブルー

包装 1箱＝ペーストA/B 各2.3mL（各4.5g）

カートリッジ入り 1本

（管理医療機器） 認証番号230AFBZX00052000



エステコア ハンドタイプ ペースト3本パック

歯科用支台築造材料

- ユニバーサル色ペーストをお得な3本パックにしました。

色調 1色 ユニバーサル

包装 1箱＝ペーストA/B 各2.3mL（各4.5g）

カートリッジ入り 3本

（管理医療機器） 認証番号230AFBZX00052000



ディスポ混和皿

- 『エステコア ボンドマー ライトレス セット』、『ボンドマー ライトレス』、『トクヤマ オルソフォースLC』の付属品として使用しているものです。
- 2穴皿で、ボンド液の採取・混和用、各種プライマーの採取・混和用として使用します。
- 天面の溝には、ミニブラシやポストを置いておくことができ、転がり落下を防止することができます。

包装 1袋=50個



ミニブラシ (ブラック)

- 『エステコア』の付属品として使用しているものです。
- 先端が細く、毛のついている部分が長いので、根管内にボンドを塗布するのに適しています。

包装 1箱=100本 (50本×2個)




ミニミキシングチップS

歯科用練成器具

- 『エステコア ボンドマー ライトレス セット』の付属品として使用しているものです。

包装 1袋=40個

(一般医療機器) 届出番号08B2X00011000110

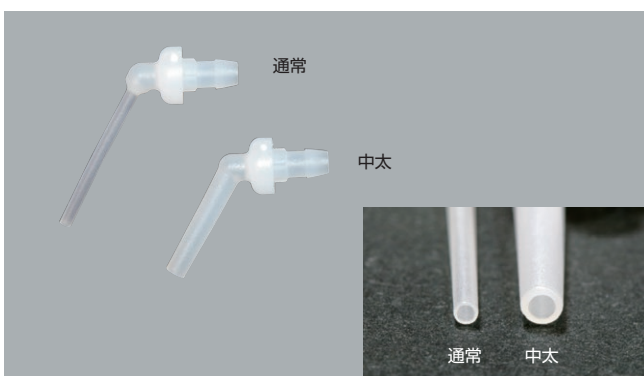


ミニミキシングチップ用ノズル

- ミニミキシングチップSの先端に取り付け、根管内への充填、また築盛用に使います。
- 『ミニミキシングチップ用ノズル』は先端の直径が細いので、1.2mmのドリルで形成された窩洞内へも直接充填ができます。

サイズ 2種類 ミニミキシングチップ用ノズル
 内径：φ0.9mm 外径：φ1.1mm
 ミニミキシングチップ用ノズル (中太)
 内径：φ1.2mm 外径：φ1.8mm

包装 1袋=40個

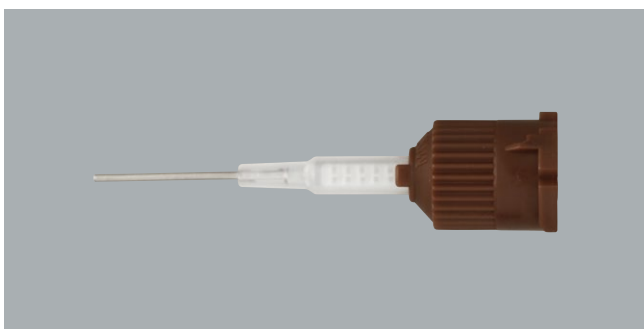

金属ノズル付ミニミキシングチップS

- エステコア ハンドタイプ専用。
- 径が細いので根管内で扱いやすい。
- お好みの向き、角度に曲げられます。(曲げすぎると折れる場合があります。135°以内で使用してください。)

包装 1袋=40個

(一般医療機器) 届出番号08B2X00011000116



トクヤマディスペンサー 10mLタイプ

歯科用練成器具

- 専用カートリッジに充填されたペーストを押し出す時に使用する器具です。
- 「エステコア」のペースト押し出し時に使用します。

包装 1箱=1個

(一般医療機器) 届出番号08B2X00011000111



トクヤマFRポスト セット


歯科根管用ポスト成形品

- レジンコアの維持として、形成後の根管に挿入するファイバーポストです。
- 高い光透過性がありますので、光の届きにくい部位のレジンの硬化を促進する効果も期待されます。
- X線造影性あり。

包装 1箱=ポスト1.2mm 10本(ケース入り)
 ポスト1.4mm 10本(ケース入り)
 ポスト1.6mm 10本(ケース入り)

各包装には「歯科医院保管用」と「歯科技工所保管用」のトレーサビリティシール各10枚が付属されています。

(管理医療機器) 認証番号21700BZY00556000

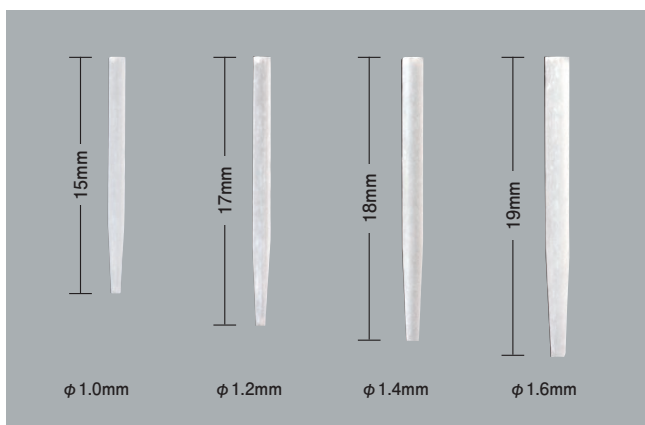

トクヤマFRポスト ポスト 単品

歯科根管用ポスト成形品

包装 ・ポスト1.0mm 1袋=10本(ケース入り)
 ・ポスト1.2mm 1袋=10本(ケース入り)
 ・ポスト1.4mm 1袋=10本(ケース入り)
 ・ポスト1.6mm 1袋=10本(ケース入り)

各包装には「歯科医院保管用」と「歯科技工所保管用」のトレーサビリティシール各10枚が付属されています。

包装 ・ポスト1.0mm 1袋=30本(ケース入り)
 ・ポスト1.2mm 1袋=30本(ケース入り)
 ・ポスト1.4mm 1袋=30本(ケース入り)
 ・ポスト1.6mm 1袋=30本(ケース入り)

各包装には「歯科医院保管用」と「歯科技工所保管用」のトレーサビリティシール各30枚が付属されています。

(管理医療機器) 認証番号21700BZY00556000