

# 知覚過敏抑制材料

トクヤマ シールドフォース プラス .....	H-2
パルフィーク スポンジ片.....	H-2
採取皿.....	H-2



## トクヤマ シールドフォース プラス

歯科用知覚過敏抑制材料/歯科用シーリング・コーティング材

- 知覚過敏症への即効性と持続性を併せ持った製品です。コーティング、シーリング材としても使用でき、形成後の生活歯を外来刺激や二次う蝕から守ります。
- 歯面への塗布後、成分である接着性モノマーと歯質のカルシウムとの反応物が素早く象牙細管内および塗布表面に生成します。エアブローで溶媒と水分を飛ばすことにより、知覚過敏が発症している表面に薄膜が形成されます。この時点で象牙細管は封鎖され、知覚過敏抑制効果が発現します。
- 光照射することで、象牙細管内の反応物と塗布表面に形成された薄膜が強固に重合・硬化し、被膜が形成されます。形成された被膜は外来刺激を遮断するだけでなく、耐歯ブラシ摩耗にも優れています。
- 修復物・補綴物を装着する症例において、歯面コーティングを施すことにより、形成後の術後過敏の抑制、また形成支台歯の汚染、接着阻害因子の付着を防止します。
- フッ素除放性あり。

包装 1箱=3mL 1本、採取皿 1個、スポンジ片 1個

(管理医療機器) 認証番号222AFBZX00063000



## トクヤマ シールドフォース プラス 単品

歯科用知覚過敏抑制材料/歯科用シーリング・コーティング材

包装 1箱=トクヤマ シールドフォース プラス 3mL

(管理医療機器) 認証番号222AFBZX00063000



## パルフィーク スポンジ片

- 液剤を歯面等に塗布するときに使用するスポンジです。
- 1箱に約400個のスポンジ片が入っています。

包装 1袋=1箱



## 採取皿

包装 1袋=1個